

INDIBA®
revitalizing lives



COMPACT Series en la Salud Íntima

¿Juegas en serio?

www.indiba.com/es

¿Qué es COMPACT?

La serie COMPACT revoluciona la salud pélvica con una tecnología de radiofrecuencia avanzada, que ofrece precisión, seguridad y una terapia holística para mejorar los resultados clínicos.

Aplicaciones

Ejemplos de indicaciones médicas:

Vulvodinia

Sequedad vaginal*

Heridas

Endometriosis

Atrofia vulvovaginal*

Prostatitis crónica

Episiotomía

Trastornos vulvares o vestibulares

Vaginismo

Dolor posparto

Hiperlaxitud vaginal*

Atrofia vulvovaginal*

Dispareunia



¿Por qué COMPACT es el Aliado Perfecto Para tu Práctica Clínica?



Versatilidad de aplicaciones



Tecnología Smart



Basado en experiencia clínica



Seguridad sin concesiones



Facilidad de uso



Resultados mejorados



Diseñado para durar



Elegancia moderna



Experiencia indolora y agradable

¿Cuáles son los Beneficios de la RF 448 kHz de INDIBA en el Suelo Pélvico?

Alivio del dolor y los síntomas asociados

Mejora de la vascularización del tejido

Acelerar la recuperación tisular

Estimular la lubricación

Cicatrización de lesiones cutáneas

Reducir el riesgo de edemas y hematomas

Recuperar la calidad de vida

Rejuvenecimiento de la piel

Drenaje linfático y venoso



*No certificado por un Organismo Notificado. Estas indicaciones no están incluidas en el alcance del Reglamento de productos sanitarios (EU)2017/745.



INDIBA®
changing lives

La ciencia detrás de la tecnología de INDIBA

Elegir un dispositivo INDIBA original significa invertir en la tecnología de referencia: fiable y científicamente probada para obtener resultados superiores. Su frecuencia estable de 448 kHz asegura resultados consistentes, clínicamente validados, y respaldados por la investigación para tratamientos predecibles y eficaces.

La tecnología de RF 448 kHz tiene efectos probados, como:

Efectos Térmicos

- Aumenta el metabolismo
- Mejora la circulación y el drenaje
- Estimula la síntesis de colágeno y elastina
- Alivia la tensión muscular y el dolor

Efectos en Subtermia

- Favorece la proliferación y diferenciación de células madre
- Potencia la reparación tisular
- Reduce la inflamación y la fibrosis
- Aumenta el metabolismo
- Regula la migración celular

Antes & Después


Caso 1

Cicatrización de la Episiotomía

Antes



Después

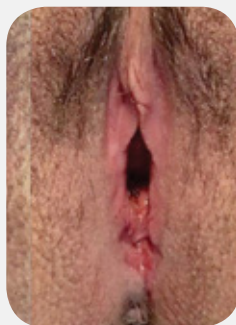

6 Sesiones en 15 días

Cortesía de Stéphanie Coudrain, Matrona

Caso 2

Prolapso Vaginal

Antes (de pie)



Después (de pie)



4 Sesiones

Caso de INDIBA, S.A.U.

Bibliografía

Para información sobre referencias bibliográficas, visita la página web:

<https://indiba.com/scientific-literature>

Si tienes cualquier duda o consulta, puedes dirigirte a nuestro dept. médico en:

medical@indiba.com

Previene la Cicatrización o Cronificación de Heridas

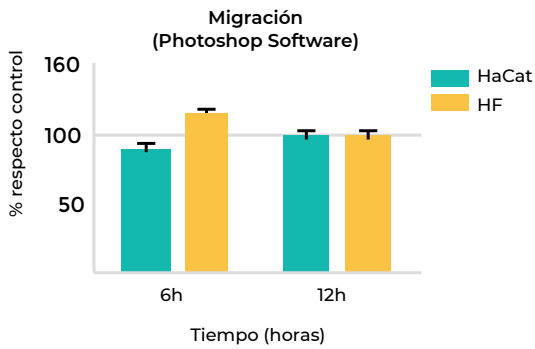


Figura 1. Cuantificación computacional del cierre de la brecha entre los bordes en tres puntos equidistantes de la brecha. El cierre de la herida fue completo sin diferencias significativas en las tasas de cierre. Adaptado de Hernández-Bule, et al. 2021

Aumento Significativo del Colágeno y los Glicosaminoglicanos

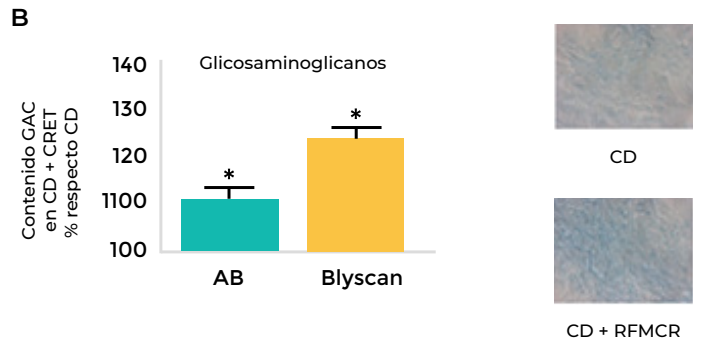


Figura 2. Cuantificación del contenido de glicosaminoglicanos (GAG) en células ADSC aisladas del tejido subcutáneo y extraídas quirúrgicamente de 4 donantes sanos. Adaptado de Hernández-Bule, et al. 2017.

Estimula la Lubricación, Mejora la Elasticidad Vaginal, la Tirantez, y el Índice de salud Vaginal


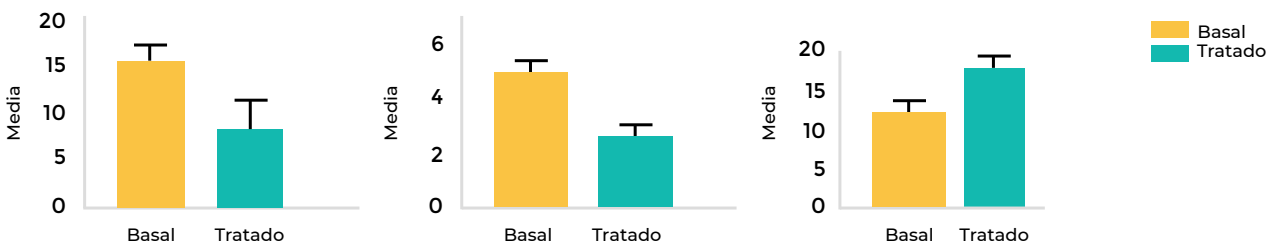


Figura 3. RFMCR 448 kHz como monoterapia con aplicación externa e intracavitaria. El protocolo realizado es de 6 sesiones de 30 minutos durante 12 semanas. A) Atrofia vaginal medida con la escala de Berreni. B) Laxitud vaginal medida con la escala de Millheiser. C) Salud vaginal medida con el índice de Bachmann. Adaptado de Cobian, et al. 2022.

Disminución del Dolor y Mejora de la Calidad de Vida en Pacientes con Dolor Pélvico Crónico



Accesorios Para el Suelo Pélvico

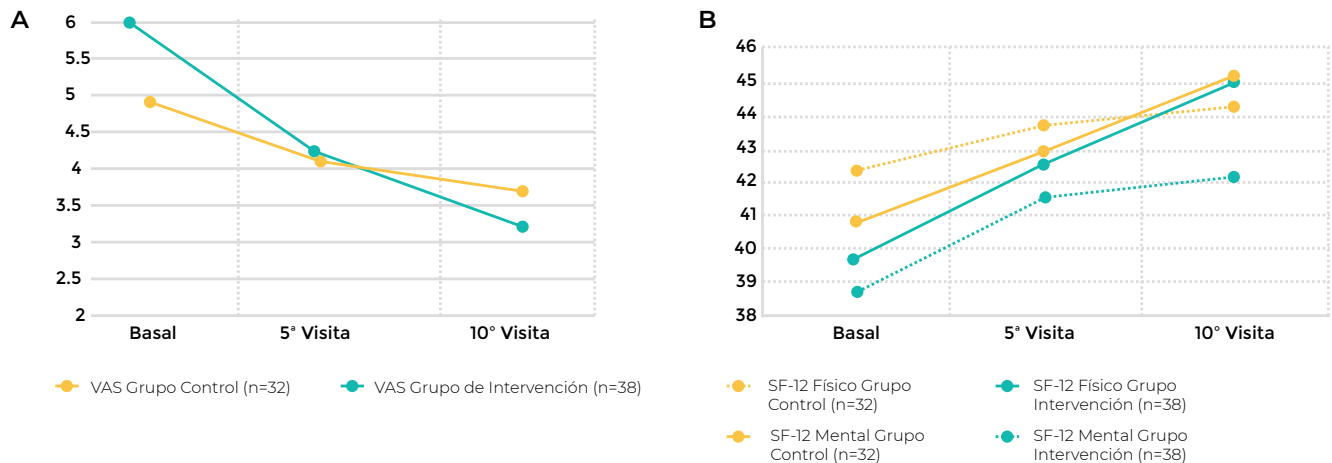


Pluma Smart - Mango intracavitario

Dispositivo avanzado con control de temperatura y electrodos CAP de un solo uso para el tratamiento de la laxitud vaginal, problemas de lubricación y atrofia.



Essence Kit

Incluye tres electrodos CAP intracavitarios reutilizables con un mango antigiro para tratamientos precisos del suelo pélvico

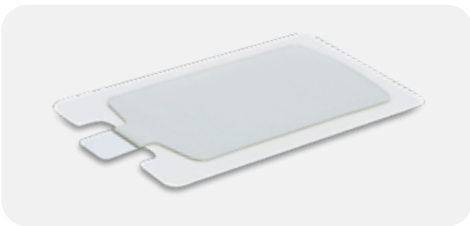

Electrodos Adhesivos Hands-Free

Favorece la sinergia abdominopélvica, la estabilidad central y la recuperación muscular.



Electrodos Longitudinales

Electrodos intracavitarios diseñados para terapias profundas y superficiales del suelo pélvico con opciones RES y CAP.



Cremas Conductoras INDIBA

Optimizan la eficacia del tratamiento, y la manipulación y la seguridad del dispositivo, preservando la garantía de los dispositivos de INDIBA.



Modo DUAL RES

El modo DUAL RES alterna dos electrodos RES con una placa de retorno, permitiendo un tratamiento eficiente en dos áreas en una misma sesión. Diseñado para rehabilitación, recuperación deportiva y tratamiento de lesiones, mejora la terapia con RF Activa, actúa sobre músculos complementarios y permite tratamientos bilaterales optimizando el tiempo. En Salud Íntima, ayuda a fortalecer el core, mejorar la postura y favorece la recuperación pélvica.




Mango Smart

- **Doble Función:** Cambio fluido entre tratamientos CAP y RES.
- **Control de Temperatura en Tiempo Real:** Garantiza precisión y seguridad.
- **Ajuste de Potencia Desde el Mango:** Permite modificar la intensidad sin interrupciones, manteniendo el enfoque en el paciente.
- **Ergonómico y Resistente:** Diseñado para un uso prolongado y un máximo confort.



Nuevo Pack Fascia (Max & Flex) con Cable Magnético

Los electrodos de acero inoxidable para fascias ofrecen una combinación excepcional de versatilidad, durabilidad y precisión. Diseñados para tratar eficazmente restricciones miofasciales, optimizando la seguridad, el rendimiento y la facilidad de uso (para fisioterapeutas de suelo pélvico).

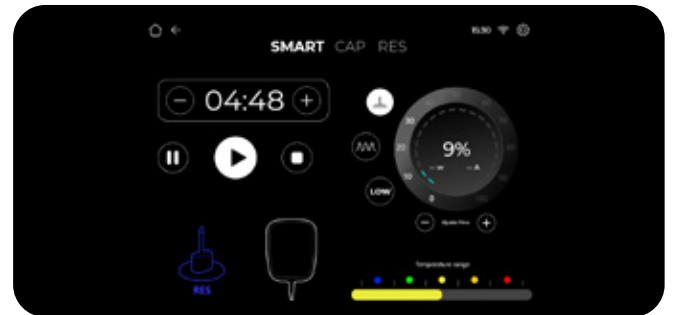

Precisión y Control Para Tratamientos sin Interrupciones

El feedback de color LED en el mango y la escala visual de temperatura en la pantalla permiten un monitoreo instantáneo de la temperatura, garantizando tratamientos precisos y seguros.

Electrodos Smart

- **Control de la Temperatura:** Asegura tratamientos precisos y seguros.
- **Mayor Comodidad:** Optimizados para un cuidado eficaz del paciente.





Dispositivo	COMPACT LITE	COMPACT PLUS	COMPACT PRO
Potencia de Salida	Potencia Media: 65 W RES / 220 VA CAP Potencia de Pico: 130 W RES	Potencia Media: 120 W RES / 375 VA CAP Potencia de Pico: 240 W RES	Potencia Media: 180 W RES / 425 VA CAP Potencia de Pico: 360 W RES
Tecnología Smart	Sin tecnología Smart	Mango Smart y sensores de temperatura	Mango Smart, sensores de temperatura y modo DUAL RES
Peso	2,9 Kg	7,3 Kg	7,3 Kg
Medidas de la Pantalla	Pantalla pequeña, Capacitiva con encoder	Pantalla táctil capacitiva de 10,4 pulgadas	Pantalla táctil capacitiva de 10,4 pulgadas
Modo DUAL RES	No	No	Sí
Sensores de Temperatura	No	Sí	Sí
Mango Smart	No	Sí	Sí
Caract. de Software	Básico, inicio en 3 clics	Software avanzado con monitorización de temperatura en tiempo real, guías de tratamiento	Software sofisticado con monitorización de temperatura en tiempo real, guías de tratamiento, escala visual de temperatura y modo DUAL RES
Accesorios Incluidos:	2 Mangos ergonómicos (RES/CAP) con cables 1 Placa de retorno 1 Placa de retorno cilíndrica 2 electrodos CAP (Ø 40 & 60 mm) 2 electrodos RES (Ø 35 & 50 mm) 1 Mochila tipo Backpack	1 Mango Smart (RES/CAP) con cable 1 Placa de retorno 3 Electrodo Smart CAP (Ø 40, 55, 65 mm) 3 Electrodo Smart RES (Ø 35, 50, 65 mm) Columna	1 Mango Smart (RES/CAP) con cable 1 Placa de retorno 4 Electrodo Smart CAP (Ø 40, 55, 65, 80 mm) 3 Electrodo Smart RES (Ø 35, 50, 65 mm) Columna DUAL RES: → 25 Placas de retorno adhesivas RES → Cable Smart, cable RES, cable de retorno
Accesorios Adicionales Disponibles	Nuevo Pack Fascia (Max & Flex) con cable magnético Electrodos Hands-Free Essence kit Pack de electrodos de Precisión / Podológicos: → Electrodo CAP Ø 19 mm, Ø 50 mm, cónico, Ø 12 o 35 mm curvo → Electrodo RES Ø 30 mm Electrodos Longitudinales (CAP & RES)	Mobility Pack: → 2 Mangos CAP & RES con cables → 2 Electrodo CAP (Ø 40 & 60 mm) → 2 Electrodo RES (Ø 35 & 50 mm) Essence kit Pluma Smart Electrodos Longitudinales CAP y RES Placa de retorno cilíndrica Nuevo Pack Fascia (Max & Flex) con cable magnético Electrodos Hands-Free Electrodos Smart adicionales: → 2 Electrodo Smart CAP (Ø 19, 30 mm) → 1 Electrodo Smart RES (Ø 19 mm)	Mobility Pack: → 2 Mangos CAP & RES con cables → 2 Electrodo CAP (Ø 40 & 60 mm) → 2 Electrodo RES (Ø 35 & 50 mm) Essence kit Pluma Smart Electrodos Longitudinales CAP y RES Placa de retorno cilíndrica Nuevo Pack Fascia (Max & Flex) con cable magnético Electrodos Hands-Free Electrodos Smart adicionales: → 2 Electrodo Smart CAP (Ø 19, 30 mm) → 2 Electrodo Smart RES (Ø 19, 90 mm)